



เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายเจลอัตโนมัติ

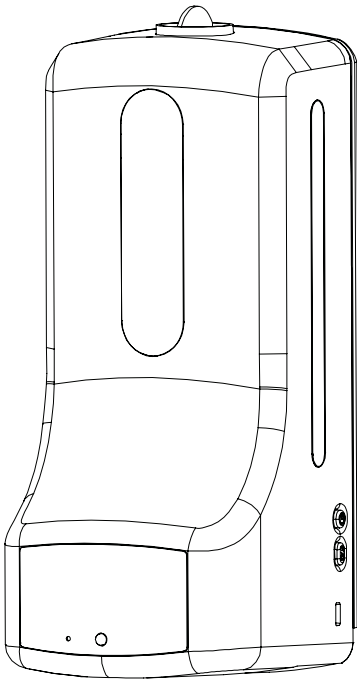

K9 Pro

Appearance

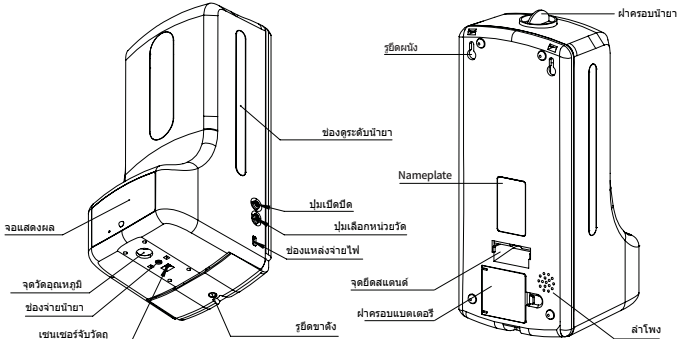

Specification

- 1.ความแม่นยำ: ±0.2°C (34~45°C,ติดตั้งอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่ต้องการเป็นเวลา 30 นาที ก่อนใช้งานจริง)
- 2.รูปแบบการแจ้งเตือน: แสงไฟ + เสียงเตือน "DIDIDI"
- 3.ระยะในการวัด: 5cm~10cm
- 4.จอแสดงผล LED: Number
- 5.ช่องเสียบจ่ายไฟ :Type-C
- 6.ความจุกระบอกน้ำยา: 1000mL
- 7.รูปแบบการติดตั้ง: แขวนกับผนัง หรือ ติดกับขาตั้ง
- 8.อุณหภูมิบริเวณโดยรอบ: 10°C~40°C (แนะนำ 15°C~35°C)
- 9.ช่วงอุณหภูมิ: 0~50°C
- 10.เวลาในการตอบสนอง: 500ms
- 11.สแตนด์บาย: 5 วินาที เมื่อไม่มีการทำงาน
- 12.แหล่งจ่ายไฟ: กระแสตรง 5V 1500MA(หรือถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน)
- 13.ขนาดเครื่อง: 119*133*280mm
- 14.ชนิดของน้ำยา: เจลล้างมือหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ


Conditions

- 1. สแตนด์บาย : จุดสีขาวจะวิ่งจากซ้ายไปขวาบริเวณด้านล่างของจอแสดงผล (Fig. 1)



(Fig.1)

- 2. อุณหภูมิปกติ: หน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิที่วัดได้ พร้อมแสงไฟสีเขียวแสดงขึ้นมา (Fig. 2)
- 3. อุณหภูมิที่ผิดปกติ: หน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิที่วัดได้ พร้อมแสงไฟสีแดงแสดงขึ้นมา (Fig. 3)

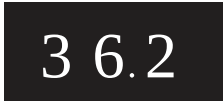

(Fig. 2)



(Fig. 3)

- 4. เมื่อวัดอุณหภูมิได้นอกระยะอุณหภูมิ "Lo": อุณหภูมิต่ำเกินไป(Fig. 4); "Hi": อุณหภูมิสูงเกินไป(Fig. 5);




(Fig. 4)



(Fig. 5)

Instructions

- 1.วัดอุณหภูมิและล้างมือ : วางมือหามบริเวณใต้เครื่องจนมีเสียง "Di" หน้าจอ LED จะแสดงผลของอุณหภูมิ พร้อมกับน้ำยาที่พ่นออกมาจากตัวเครื่อง (Fig. 6)

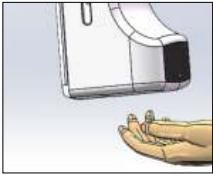

(Fig. 6)


- 2. ปุ่มที่ใช้ในการตั้งค่า:

(1) ปุ่ม ①: ใช้เลือกการตั้งค่า(Fig. 7)

(2)ปุ่ม ②: ใช้ในการเปลี่ยนค่าในการตั้งค่า(Fig. 8)



(Fig. 7)

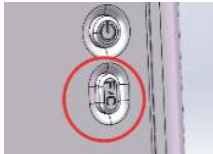

(Fig. 8)

- 3. การตั้งค่าการใช้งาน

กดปุ่ม ① หนึ่งครั้งเพื่อตั้งค่าหน่วยวัดอุณหภูมิ

กดปุ่ม ② เพื่อเปลี่ยนหน่วยวัดระหว่าง องศาเซลเซียส กับ องศาฟาเรนไฮต์

C: องศาเซลเซียส F: องศาฟาเรนไฮต์ (Fig. 9, Fig. 10)



(Fig.9)



(Fig. 10)

กดปุ่ม ① ส่องครึ่งเพื่อเข้าเลือกโหมดการทำงาน

กดปุ่ม ② เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงานของเครื่อง Bod:วัดอุณหภูมิร่างกาย Cou:นับจำนวนครั้ง Sur:วัดอุณหภูมิพื้นผิว



กดปุ่ม ① สามครั้งเพื่อเข้าการตั้งค่าอุณหภูมิแจ้งเตือน

กดปุ่ม ② เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่จะแจ้งเตือนเมื่อทำการวัดได้ถึงตั้งแต่ 36°C - 39°C



กดปุ่ม ① สี่ครั้งเพื่อตั้งค่าความดังของเสียง

กดปุ่ม ② เพื่อเปลี่ยนค่าความดังเสียงของตัวเครื่อง U0 ถึง U4



กดปุ่ม ① ทำเครื่องเพื่อเข้าหน้าเลือกภาษาของเครื่อง

กดปุ่ม ② เพื่อเลือกเปลี่ยนภาษาของเครื่อง CH/EN/KO/PT/ES

CH: จีน EN: อังกฤษ KO: เกาหลี PT: โปรตุเกส ES: สเปน



กดปุ่ม ① หกครั้งเพื่อเข้าตั้งค่าเวลาในการจ่ายน้ำยา

กดปุ่ม ② เพื่อตั้งค่าระยะเวลาในการจ่ายน้ำยาออกมา ตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 2.0 วินาที



กดปุ่ม ① เป็นเวลา 2 วินาทีหรือมากกว่านั้นเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

Mounting

- (1)ติดตั้งกับขาตั้ง : จะมีรูยึดอยู่บริเวณใต้ตัวเครื่องสามารถนำอุปกรณ์ไปติดตั้งกับขาตั้งโดยการขันลงไปได้เลย (Fig. 11)
- (2) ติดตั้งกับผนัง : จะมีรูสำหรับแขวนกับผนังที่เจาะกับผนัง อยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่อง สามารถนำเครื่องไปแขวนได้ (Fig. 12)




(Fig. 11)




(Fig. 12)

- (3)ติดตั้งกับสแตนด์โต๊ะ : สามารถนำตัวเครื่องประกอบกับสแตนด์สแตนด์ได้เลย (Fig. 13)

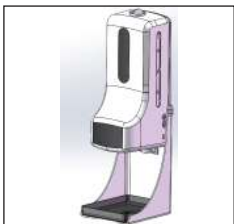


(Fig. 13)

- (4)ติดตั้งกับสแตนด์แล้วนำไปแขวนผนัง : นำตัวเครื่องที่ประกอบกับสแตนด์ไปแขวนกับผนังที่ผนังได้ตามรูยึดที่สแตนด์ (Fig. 14)

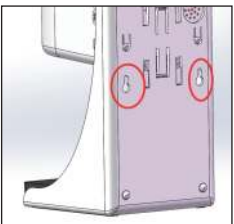


(Fig. 14)

- (5)ติดตั้งเครื่องประกอบสแตนด์แล้วนำไปยึดกับขาตั้ง (Fig. 15)

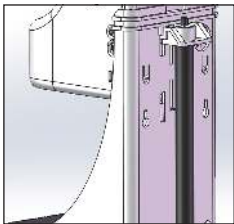

(Fig. 15)

- (6)เปิดและปิดเครื่อง : กดปุ่มด้านข้างของตัวเครื่อง (Fig. 16)

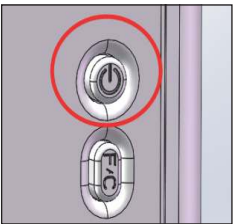

(Fig. 16)

- (7)การใส่ถ่าน : เปิดฝาคอมนด้านออกแล้วใช้นิ้วกดไขควงออก นำถ่าน AA ใส่เข้าไป 4 ก้อน ตามทิศทางที่ระบุไว้ (Fig. 17)



(Fig. 17)

Warnings

- 1. อย่าเทเจลล้างมือหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโดยตรงบริเวณจุดวัดอุณหภูมิและเซ็นเซอร์จับวัตถุ
- 2. ตั้งเครื่องให้ตรงและถูกทางก่อนที่จะเริ่มนำยาลงไป